

Instrucțiuni de utilizare a testelor rapide AG pentru COVID-19

Anexa 3

Kitul de testare rapidă conține:

- Instrucțiuni de utilizare
- Casete sterile de testare
- Tampon steril pentru recoltarea exudatului
- Recipient(tub) de unică utilizare cu picurator și soluție de testare, sau
- Soluție de testare (unii producători livrează recipientii pregătiți cu soluție, alții livrează soluția în recipienti separați)

Modul de recoltare. Pașii care trebuie urmați:

1. Echiparea personalului care recoltează. Echipamentul de lucru este compus din mască, halat de unică utilizare, viziera (sau ochelari de protecție), mănuși de examinare.
 2. Se desface capacul recipientului de unică utilizare și se așează în suport. Dacă recipientul nu conține soluție de testare se adaugă 10 picături
 3. Se desigilează tamponul steril și se introduce cu grijă în cavitatea nazală până în rinofaringe (betigasul tamponului prezintă de regulă un marcaj). Tamponul se rotește cu blândețe de 1-2 ori și apoi se scoate.
 4. Se introduce tamponul cu proba în recipientul cu soluția de testare și se rotește de 5 ori.
 5. Se atașează picuratorul la tub.
 6. Se desigilează testul și se adaugă 3 picături în zona dedicată (aflată în partea de jos a casetei).
 7. Rezultatul se interpretează după 10-15 minute.
- ATENȚIE: dacă se depășesc 30 de minute, rezultatul poate fi eronat.

INTERPRETAREA REZULTATULUI:

Corectitudinea recoltării este confirmată prin linia de control C. Dacă această linie nu este evidențiată testul este invalid.

Dacă pe grilă casetei apare evidențiată doar linia de control C, testul este negativ. Rezultatul este pozitiv dacă pe grilă de control sunt evidențiate ambele linii (control C și test T)

